



ÖSTERREICHISCHE R Ö N T G E N G E S E L L S C H A F T

BEREICH FACHARZTPRÜFUNG
PRIM. UNIV. DOZ. DR. W. SCHIMA, MSc
AUSBILDUNGS- UND FORTBILDUNGSVERANTWÖRTLICHER DER ÖRG

Kurzanleitung zur Installation des Dicom-Viewers und zum Import der Fälle

1. Über den Arbeitsplatz oder Explorer die DVD mit der Bezeichnung "FAP 2009-02" öffnen.
2. Den **Ordner "FAP 2009-02-Viewer"** kopieren und auf Ihrem Computer/Festplatte (ACHTUNG: **nicht am Desktop!**) abspeichern.
3. Den von Ihnen gespeicherten Ordner „FAP 2009-02-Viewer“ öffnen, dann die **Datei „Installer VI.6.0 German“** anklicken, um die Installation des Viewers zu starten.
 - Die Abfrage "K-PACS ENDUSER SOFTWARE LICENCE AGREEMENT" mit Accept bestätigen.
 - „K-PACS directories mit Next bestätigen (ACHTUNG: Sollten Sie auf **C:** nichts installieren dürfen, wählen Sie bitte den entsprechenden Installationsort aus!)
 - Die folgende Abfrage wieder mit Next bestätigen, anschließend die Installation mit Finish abschließen und die darauf folgende Meldung mit OK bestätigen.
4. Das Programm legt den Icon "K-Pacs" am Desktop an.
5. "K-Pacs" starten → die folgende Meldung mit Accept bestätigen.
6. Unter Abfrage (rechts oben) Dateisystem - "Filesystem" anwählen.
7. Das entsprechende Verzeichnis/Speicherort, in dem sich der **Ordner "FAP 2009-02-Viewer"** befindet, anwählen. Den Ordner "FAP 2009-02-Viewer" öffnen, den

Unterordner „ImageboxMitUebung“ (darin befinden sich die zu importierenden DICOM Bilder) auswählen und danach auf „Übernehmen“ klicken. K-Pacs beginnt die Fälle zu laden. (K-Pacs importiert automatisch auch aus Unterverzeichnissen)

8. Nach dem Laden alle Studien durch Anklicken des linken Kästchens markieren (Häkchen erscheint).
9. Den Viewer Button (links oben) drücken → die Untersuchungen werden geladen
10. Den Viewer schließen.
11. Den Viewer wieder starten → Unter Abfrage (rechts oben) “Datenbank” anwählen – es sind jetzt alle Studien ins K-Pacs geladen.
12. Den Reiter “Patient list” links anwählen: die Fälle sind geordnet nach Studien (alle zu einem Fall gehörigen Studien gemeinsam)
13. Den Reiter „Patientenname“ einmal anklicken, um die Fälle zu sortieren.
14. Den gewünschten Fall mit Doppelklick öffnen → Mit Hilfe der Scrollfunktion sowie der Bildlaufleiste kann zwischen den Bildern gewechselt werden.